

KZ Стетоскоп B.Well, моделі WS-1

Біржақты бастиекпен қамтылған кәсіби стетоскоп

Жоғары сапалы материалдардан жасалған.

WS-1 стетоскопы артериялық қан қысымын механикалық тонометрмен өлшеген кезде, Коротков дыбыстарын тыңдауға арналған.

Қолдану аясы: денсаулық сақтау саласының емдеу-алдын алу мекемелері және жеке мақсатпен пайдалану.

Қарсы көрсетімдер: қарсы көрсетімдер анықталмаған.

Тазалау: 70% изопропил спиртіне малынған жұмсақ матамен сүртіңіз.

Жиынтықтамасы:

1. PVC материалынан құйылған, стетоскопқа жалғанатын берік түтік
2. Стетоскопқа арналған жеңіл, алюминий
3. Хромдалған бинауральды түтік
4. Құлаққа арналған жұмсақ, эргономикалық қаптамалар
5. Өте сезімтал мембрана

Кәдеге жарату: тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға болады.

Стандарттарға сәйкестік:

ISO 13485:2016. EO 93/42 директивасына сәйкес.

Кепілдікті міндеттемелер:

Дайындаушы, стетоскоп сатып алынған күннен бастап 5 жыл бойы бұйымға* ақысыз негізде сервистік қызмет көрсетуді және 12 ай бойы кепілдікті міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етеді. B.Well бұйымдарының қолданылу мерзімі кемінде 10 жыл.

Өз қалаңыздағы сервистік-консультациялық пунктiлердiң мекенжайын **8 800 200-33-22** ақысыз қауырт желі телефоны арқылы және «Альфа-Медика» компаниясының www.alpha-medica.ru сайтынан біле аласыз

* ақысыз негізде сервистік қызмет көрсету – бұйымға өндірушінің кесірінен келтірілген кемшіліктерді (ақауларды) кетіру.

RU Стетоскоп серии WS, модель WS-1

Профессиональный стетоскоп с односторонней головкой

Изготовлен из высококачественных материалов.

Стетоскоп WS-1 предназначен для прослушивания тонов Короткова при измерении артериального давления механическим тонометром.

Область применения: лечебно-профилактические учреждения здравоохранения и индивидуальное использование.

Противопоказания: противопоказаний не выявлено.

Очистка: протрите мягкой тканью, смоченной в 70% изопропиловом спирте.

Комплектация:

1. Трубка соединительная для стетоскопа, прочная литая из PVC
2. Головка для стетоскопа, легкая алюминиевая
3. Трубка бинауральная, хромированная
4. Насадки для ушей, мягкие эргономичные
5. Мембрана, высокочувствительная

Утилизация: может быть утилизировано вместе с бытовыми отходами.

Соответствие стандартам:

Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/3080 от 23.08.2018 г.

ISO 13485:2016. Соответствует директиве EC 93/42.

Гарантийные обязательства:

Изготовитель обеспечивает бесплатное сервисное обслуживание изделия* в течение 5 лет и гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты приобретения стетоскопа. Срок службы приборов B.Well установлен не менее 10 лет.

Адреса сервисно-консультационных пунктов в Вашем городе Вы можете узнать по телефону бесплатной горячей линии **8 800 200-33-22** и на сайте компании «Альфа-Медика» www.alpha-medica.ru или www.bwell-swiss.ru

* бесплатное сервисное обслуживание – устранение недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине производителя.

Дата изготовления указана в номере LOT: номер недели, последние две цифры года.

Расшифровка символов:

+5°C		Ограничение по температуре применения +5 – +40 °C
-20°C		Ограничение по температуре хранения -20 – +70 °C

Место производства:
Уси Эксаново Медикал Инструмент Ко., Лтд.,
№42 Зизин роуд, Чанджинг, Зибей Таун,
Уси Сити, 214194 Цзянсу, Китай.



Сертификация CE



Производитель



Номер партии



Может быть утилизировано вместе с бытовыми отходами



Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство

Тұтынушылардан өнім сапасы туралы түскен шағымдарды Қазақстан Республикасы аумағында қабылдайтын ұйымның атауы және мекенжайы: Қазақстан Республикасындағы өкілдігі: «Diomed» ЖШС, Алматы, Чайковский көшесі, 22-үй, 211-кеңсе тел.: +7 (727) 233 57 21.

Организация, принимающая на территории Республики Казахстан претензии от потребителя по качеству продукта: Представительство в Республике Казахстан: ТОО «DIOMED», Алматы, ул. Чайковского, д. 22, оф. 211 тел.: +7 (727) 233 57 21.