

Мини-инвазивная инъекционно-паровая терапия **Rezūm™**

Краткое руководство пользователя


Необходимое оборудование

- Генератор системы Rezūm
- Устройство подачи пара (рукоятка)
- Физиологический раствор комнатной температуры (1 л, 2 л, 3 л, 4 л, 5 л или 500 мл)
- Стойка для инфузионной системы
- Стерильная дистиллированная вода – 50мл
- Телескоп (30°, 4 мм, 30 см) Storz или Richard-Wolf (линзы Olympus и ACMI 30°, 4 мм имеют длину 28 см и не подходят для устройства Rezūm).
- Водорастворимый гель для введения инструмента
- Эндоскопическая Видеосистема
- Источник света и световод
- Операционный стол с подставками для ног для принятия литотомического положения (бедро согнута на 90°)
- Антисептический раствор для обработки операционного поля
- Стерильное белье для ограничения операционного поля
- Емкость для дренажа
- Уретральный Катетер

Система Rezūm



Оборудование кабинета

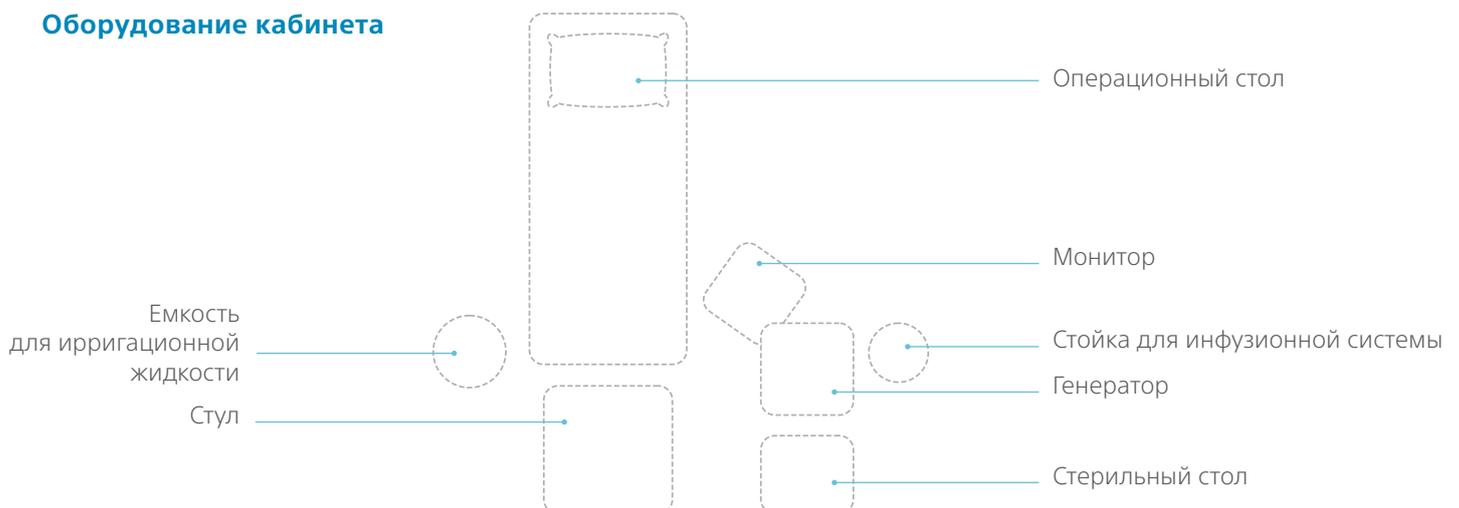

Сбор системы



Распаковка устройства

Соблюдая стерильность, извлеките шприц из упаковки и подсоедините иглу к шприцу.



Подсоедините генератор

Подключите к генератору радиочастотный (РЧ) электрический кабель. Убедитесь, что белая и красная метки совмещены.



Подача физраствора

Подключите систему подачи физраствора к помпе, используя в качестве ориентира цветные индикаторы.




Подключение воды

Поместите заполненный шприц в отсек для фиксации шприца. Снимите синий защитный колпачок с системы для инфузии и подсоедините ее к шприцу так, чтобы белый клапан давления был направлен вниз.



Вставка телескопа

Смажьте водорастворимым гелем и вставьте телескоп в устройство доставки пара до щелчка. Необходим телескоп с углом обзора 30°, диаметром 4 мм, длиной 30 см.

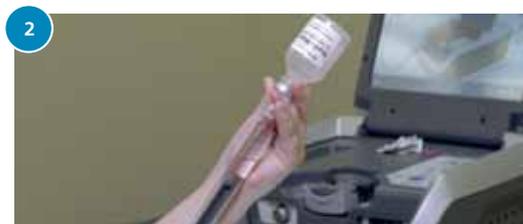

Заполните шприц

Заполните шприц системы Rezūm™, стерильной дистиллированной водой, и убедитесь, что из шприца удалены все пузырьки воздуха.



Выдвижение иглы

Убедитесь, что игла выдвигается автоматически.



Подсоединение физиологического раствора

Подсоедините систему для инфузии к емкости с физраствором и убедитесь, что зажим и вентиляционное отверстие на капельнице открыты.



Зажим дренажной системы

Закройте зажим на дренажной системе, чтобы обеспечить поток физраствора через устройство доставки пара во время процедуры.



Начало работы

Приведите устройство в действие, нажав белую и серую кнопки одновременно, пока не выдвинется игла. Держите дистальный конец устройства над контейнером для отходов. Нажмите и удерживайте синюю кнопку активации пара до завершения цикла заполнения системы (примерно 30 секунд). Настройка системы Rezūm теперь завершена и готова к процедуре.

ВНИМАНИЕ: Закон ограничивает продажу этих устройств врачом или по предписанию врача. Показания, противопоказания, предупреждения и инструкции по применению приведены в маркировке изделия, прилагаемой к каждому устройству. Продукты представлены только в целях ИНФОРМАЦИИ и могут быть не одобрены или не продаваться в некоторых странах. Данный материал не предназначен для использования во Франции. Продукт доступен только в Европейской экономической зоне. Пожалуйста, уточните наличие у местного торгового представителя или в службе поддержки клиентов. Все фотографии предоставлены компанией Boston Scientific. URO-579116-AA

Boston Scientific
Advancing science for life™

www.bostonscientific.eu

© 2021 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved. DINURO2466EA